

# VisiQuick Nieuwsbrief december 2025

Release: 4.10.0



Beste VisiQuick gebruiker,

Vandaag hebben wij een nieuwe release van VisiQuick, versie 4.10 vrijgegeven. Via dit schrijven willen wij u graag informeren over de mogelijkheden in deze nieuwe versie.

## Inhoud

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Vooraf .....                                         | 1 |
| Aanpassing telefonische bereikbaarheid Citodent..... | 2 |
| Belangrijkste wijzigingen .....                      | 2 |
| Herstellen verwijderde afbeeldingen .....            | 2 |
| Uitbreiding Twain functionaliteit .....              | 2 |
| AI-bewustwording .....                               | 3 |
| Second Opinion Zekerheidsniveau .....                | 3 |
| Toevoeging nieuwe hardware ondersteuning .....       | 3 |
| Correcties.....                                      | 4 |
| Wie kan deze update verwerken? .....                 | 4 |
| Hoe kunt u VisiQuick updaten? .....                  | 4 |
| Updaten van overige VisiQuick onderdelen .....       | 5 |
| Bekende problemen .....                              | 5 |


## Vooraf

VisiQuick wordt ondersteund tot 2 versies terug. Met het uitbrengen van versie 4.10, wordt de laagst ondersteunde versie dus 4.8.

Indien u nu met een VisiQuick versie lager dan 4.7 werkt, is het van het grootste belang dat alle VisiQuick installaties en een eventueel replicatie client allemaal tegelijk geupdate worden naar VisiQuick versie 4.10.0. Reden hiervoor is dat er vanaf versie 4.7. een wijziging in de database heeft plaats gevonden.

***U kunt dus niet met versie lager dan 4.7 en een nieuwe VisiQuick versie door elkaar werken!***

De genoemde replicatie client wordt gebruikt op om meerdere database met elkaar te synchroniseren. Twijfelt u of u replicatie gebruikt, controleer dit dan via menu Help – Licentie.

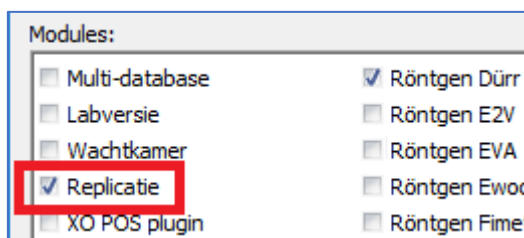

# VisiQuick Nieuwsbrief december 2025

Release: 4.10.0



De update procedure dient bij gebruik van Replicatie in de volgende volgorde voltooid te worden:

- 1) Alle replicatie server service installaties updaten
- 2) De replicatie client installatie updaten
- 3) Alle VisiQuick installaties die gebruik maken van een van de te repliceren of te ontvangen databases updaten. (in geval van meerdere locaties, dus op ALLE locaties).

## Aanpassing telefonische bereikbaarheid Citodent

De VisiQuick helpdesk is eerste en tweede kerstdag 25 en 26 december 2025 en donderdag 1 januari 2026 volledig gesloten. Op 24 december zijn wij enkel de ochtend bereikbaar.

Daarnaast zal de telefonische bereikbaarheid van Citodent met ingang van 22 december wijzigingen naar van 09:00 tot 16:00. De kantoor tijden blijven 08:30 tot 17:00.

Wilt u contact met de helpdesk binnen kantoor tijden, maar buiten telefonische bereikbaarheid, plant u dit dan van te voren met ons in.

## Belangrijkste wijzigingen

### Herstellen verwijderde afbeeldingen


VisiQuick kent al de optie om de mogelijkheid om beelden te verwijderen helemaal uit te schakelen, maar stel u wilt dit wel kunnen en maakt per ongeluk een foutje?

Binnen VisiQuick kunt u nu eenvoudig één of meer verwijderde beelden bij de patiënt herstellen.

U opent de betreffende patiënt in VisiQuick en gaat naar menu Patiënt – Verwijderde beelden.

Hier heeft u een overzicht van eerder verwijderde beelden en de mogelijkheid deze weer te herstellen.

Geadviseerd wordt om het verwijderen van afbeeldingen op slechte enkele werkstations toe te staan, bijv. alleen de acquisitie werkplekken. Per werkstation kunt u het verwijderen van afbeeldingen deactiveren via menu Extra – Database instellingen, tabblad Algemeen – Blokkeer verwijderen foto's. Deze instelling wordt per werkplek opgeslagen.

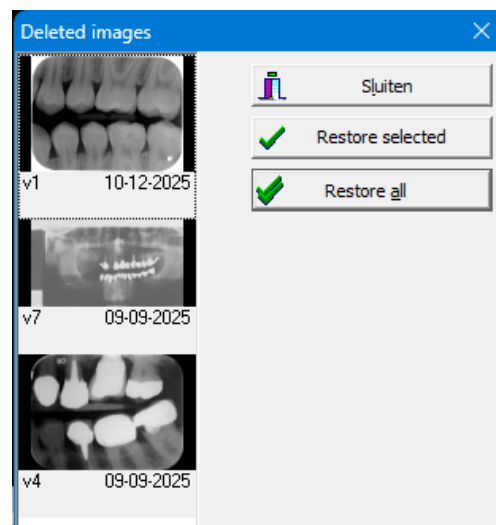


### Uitbreiding Twain functionaliteit

VisiQuick kent een breed scala aan mogelijkheden voor het aansturen van apparatuur, waaronder het aansturen van scanners, intra orale camera's en röntgen apparatuur via Twain.

Deze Twain functionaliteit kende een beperking in het feit dat de aansturing altijd onder de scanner knop terecht kwam.



In VisiQuick is de Twain functionaliteit nu verbeterd met meer configuratie opties, een breder ondersteuning en de mogelijkheid uw Twain apparatuur te plaatsen onder de knop waar de apparatuur toe behoort.

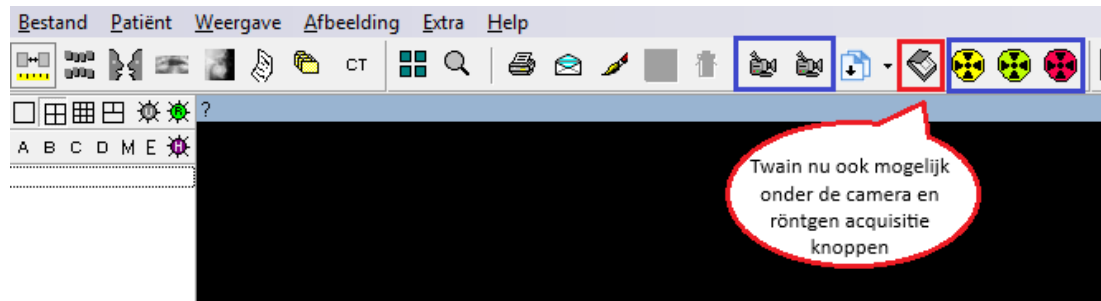

Onder de röntgen acquisitie knop heeft u nu ook de mogelijkheid generieke Twain aansturing toe te voegen alsmede onder de camera knop (menu Extra – Apparaat instellingen – Video).

Heeft u nu nog een camera of röntgen apparatuur welke met de scanner knop aangestuurd moet worden, neem dan contact met ons op om dit te corrigeren en te profiteren van een meer stabiele Twain aansturing.

Binnen de Remote Xray server had u al de optie van generieke Twain aansturing, maar deze is uitgebreid met meer configuratie opties en daarmee gelijk getrokken met de instellingen in VisiQuick zelf. Ook hier is de afhandeling van Twain beelden aangepast om een bredere ondersteuning voor Twain compatible apparatuur te bieden.

## AI-bewustwording

Het gebruik van AI in de mondzorg praktijk wordt steeds frequenter, maar met dit gebruik komt u ook in aanraking met AI wetgeving en daarmee AI-geletterdheid en -bewustwording in de praktijk.

Binnen VisiQuick wordt u nu geattendeerd op het gebruik van AI zodra dit op een foto wordt toegepast. Bij de foto zelf wordt in het rood een AI markering weergegeven en onder in beeld wordt een melding gegeven dat AI resultaten worden getoond voor hulp bij diagnose om het bewust zijn te vergroten.

## Second Opinion Zekerheidsniveau

Wanneer u gebruik maakt van de integratie van Second Opinion AI in VisiQuick heeft u in uw Second Opinion werkbalk de keuze uit verscheidene "Detection levels".

Uit feedback van gebruikers bleek dat deze benaming verwarring opleverde. Voortaan wordt hier gesproken over "Zekerheidsniveau". Hiermee wordt bedoeld de mate waarin de AI zeker is van haar bevindingen.

Bij een laag zekerheidsniveau worden er meer resultaten getoond (ook resultaten met een mindere zekerheid) dan wanneer u het zekerheidsniveau instelt op Hoog. Bij "Hoog" worden alleen de resultaten getoond met een hoge mate van zekerheid. Bij de keuze voor "mens" worden er uiteraard geen AI resultaten op de foto getoond.

## Toevoeging nieuwe hardware ondersteuning

- Generieke Twain aansturing toegevoegd onder Röntgen apparatuur.
- Ondersteuning Ray RioScan via RayScanAcq SDK of RayTwain driver.

# VisiQuick Nieuwsbrief december 2025

Release: 4.10.0



- Ondersteuning Ray RioSensor 1 through RayIO500 SDK
- Ondersteuning Ray RioSensor 2 via RIS510 SDK
- Ondersteuning Ray RioSensor/RioSensor+ via RayTwain driver.
- Generieke Twain aansturing toegevoegd onder Video apparatuur.
- Generieke Twain aansturing toegevoegd onder camera drivers.
- Ondersteuning Owandy IOS intraoral scanner voor 3D beetregistratie en -modellen.

## Correcties

- In de Shining 3D link is nu het gebruik van Cloud diensten en Order systeem te activeren.
- Configuratie instellingen OnDemand link werden niet altijd goed weggeschreven.
- Rechtsklik in Remote X-ray worklist selecteert ook de patiënt/ acquisitie opdracht.
- Bij het verplaatsen van intern in VisiQuick opgeslagen CT beelden naar een andere patiënt werd standaard CT module Vatech geselecteerd.
- Bij het koppelen met Second Opinion werd onterecht geen waarschuwing gegeven wanneer de credentials niet juist zijn.
- Wanneer een eerder geselecteerde importlocatie niet kon worden gevonden, kon dit leiden tot een niet te omzeilen foutmelding bij het openen van het importscherm.

## Wie kan deze update verwerken?

Deze update kan verwerkt worden door iedereen met een VisiQuick 4.7 versie of hoger heeft en een geldig abonnement.

Uw VisiQuick versie vindt u rechtsonder in het VisiQuick scherm. Begint dit met een 4, maar een lagere versie dan 4.7, lees dan eerst de waarschuwing bij "[Vooraf](#)".

Is uw versie lager dan 4, neemt u dan contact met ons op.

## Hoe kunt u VisiQuick updaten?

Het updaten van VisiQuick gaat zeer eenvoudig en duurt ongeveer 5 minuten per werkplek. Uw huidige instellingen blijven bij het updaten gewoon bewaard.

Op onze website vindt u een korte [instructie video](#) hoe het updaten werkt of lees de instructies hieronder. Laat u de update liever door uw eigen ICT partij uitvoeren, stuurt u deze mail naar hen door.

De update zelf vindt u ook op onze website onder de Downloads: [Ga naar update downloaden](#)

1. Zoek de gedownloade Setup op in uw downloads folder.
2. Klik met rechts aan, Eigenschappen, Deblokkeer.

**NB. Deblokkeer altijd de gedownloade zipfile via rechtsklik Eigenschappen, Deblokkeer voordat u deze uitpakt en de update verwerkt!**

3. Klik de zip met rechts aan en kies voor Alles uitpakken.
4. U kunt deze eventueel ook gelijk uitpakken naar de centrale Setup map in uw VisiShare. Hij is dan vanaf alle werkplekken bereikbaar.
5. Open de uitgepakte map.
6. Sluit VisiQuick op deze werkplek



7. Start VisiQuick Setup.
8. Indien er geconstateerd wordt dat de VisiQuick folder niet leeg is, wordt er om bevestiging gevraagd om deze map te gebruiken.
9. Maak u geen zorgen de configuratie instellingen van uw pakket worden hierbij wel behouden. Als de geïnstalleerd VisiQuick versie erg verouderd is wordt u om bevestiging gevraagd om de oude versie te verwijderen. Ook hierbij blijven de instellingen wel behouden.
10. Klik hier op [Yes] om verder te gaan met de update.
11. De gedeelde folder wordt aangegeven, klik op [Next >] om door te gaan.
12. Nogmaals [Next >], [Install].

**NB. VisiQuick hoeft niet op alle werkplekken uit te staan tijdens het installeren, maar wij adviseren wel bij het updaten van VisiQuick alle werkplekken hierin mee te nemen.**

## Updaten van overige VisiQuick onderdelen

Denk bij het updaten van VisiQuick ook aan eventueel geïnstalleerde Remote X-ray server, Replicatie server en Replicatie client installaties.

Wij raden tevens aan de koppeling tussen uw administratie systeem en VisiQuick met enige regelmaat te update. Deze vindt u in de gedownloade setup folder `..\tools\VqLink\VqLinkSetup.exe`

Deze start u en vervolgens klinkt u een aantal maal op Volgende en laat u de default instellingen staan. Afhankelijk van of uw administratie pakket een centraal geïnstalleerd applicatie is of een installatie per werkplek dient de koppeling 1 x centraal ge-update te worden of per werkplek. Bij een centraal geïnstalleerde executable dient het administratie pakket tijdens het installeren van de koppelings-update op alle werkplekken afgesloten te zijn. Bij een patiënt administratie pakket die per werkplek een lokale executable heeft, dient het patiënt administratie pakket enkel op de werkplek die ge-update wordt afgesloten te zijn.

## Bekende problemen

Wanneer u een foutmelding krijgt m.b.t. toegang of machtiging tot het bestand wanneer u de VisiQuick Setup probeert uit te voeren, probeer het volgende:

1. Indien u de setup start vanuit een netwerk locatie, kopieer de setup dan eens naar de lokale computer en probeer het nog eens.
2. Schakel tijdelijk uw Anti virus bescherming uit en probeer het nog eens.

